



Medisinsk biokjemi: Analyser som utføres v/Helgelandssykehuset Mosjøen

		Hematologi/koagulasjon	Evt. merknader		
		B-Hemoglobin	Holdbar -romtemperatur 72 t		
		B-Leukocytter	Holdbar -romtemperatur 72 t		
		B-Leukocytt – 5diff.	Holdbar -romtemperatur 48 t		
		B-Trombocytter	Holdbar -romtemperatur 72 t		
		B-Erytrocytter	Holdbar -romtemperatur 72 t		
		B-Blodutstryk	Holdbar -romtemperatur 4 t		
		B-Evf			
		(B)MCV			
		(B)MCH			
		(B)MCHC			
		P-PT-INR	Usentrifugert 48 t i romtemperatur		
		P-D-Dimer	Avpip.24t i romtemp. 8t sentrifugert ikke avpip.		
		P-APTT	Sentrifugeres, avpipeteres holdbart 3t evt fryses!		
		Klinisk kjemi – vanlige tester			
		S- CRP			
		S-Natrium			
		S-Kalium			
		S-Kreatinin			
		S-Kalsium			
		S-Uorganisk fosfat			
		S-Urat			
		S-Bilirubin total			
		S-ALAT			
		S-GT			
		S-ALP			
		S-Pankreasamylase			
		S-ASAT			
		S-LD			
		S-CK			
		S-Troponin T (High sensitive)	Bruk lys grønn v/oppfølging innl.pas		
		S/P-Glukose			
		B-HbA1c			
		S-kolesterol			
		S-HDL-kolesterol	Faste *, dvs min 10 timer		
		S-LDL-kolesterol	Faste, dvs min 10 timer		
		S-Triglyserider	Faste, dvs min 10 timer		
		S-Karbamid			
		S-Magnesium			
		S-Jern og TIBC			
		S-Transferrin			
		S-Ferritin			
		S-Kobalamin (B ₁₂)			
		S-Folat			
		S-Vitamin D			
		S-Etanol	Kun innlagte pasienter		
		Glukosebelastning	Må avtales - fastende glukose må foreligge		
		Proteiner og hormoner	Evt. merknad	Diverse urin	
		S-Albumin		U-stix/micro	
		S-PSA		U-albumin	
		S-TSH		U-kreatinin	
		S-FT4		U-alb/kreat-ratio	
		S- FT3		GFR	kalkulert
		S-HCG			



Ta bare på lysegrønne glass når det er Ø-hjelp. Holdbarheten av analyttene er mye kortere
Anbefalt rekkefølge:
Sjekk alltid leverandørens anbefalinger:

Prøvetakingsrør type:	Vendes umiddelbart (minimum antall ganger)
1. Blodkultur	6
2. Rør u/tilsetning (hvit kork, evt rød fra BD)	-
3. Koagulasjons rør	4
4. Serumrør uten gel og med gel	8
5. Heparinrør	8
6. EDTA rør	8
7. PPT- rør (EDTA)	8-10
8. Glukoserør (Na fluorid)	8
9. Senknings rør	8

*Ved faste skal pasienten ikke ha spist, drukket, snuset eller røkt de siste 10 timene. Det er altså ikke lov å drikke kaffe eller røyke før fastende prøve skal tas, litt vann kan tillates.

Dersom du bruker **butterfly** – ta et serumglass (evt kasteglass) før du fyller det blå citratrøret til koagulasjon

Medikament analyser: Nlsh Bodø og St.Olav godtar medikamentspeil i serum tatt på gel glass.
Kan ikke oppbevares på gel over helg,